

## **Proovide võtmine sigade epideemilise diarröa ja transmissiivse gastroenteriidi diagnoosimiseks koproproovidest**

### **Viiruste antigeenide tuvastamiseks**

- Koproproov võetakse haiguse ägedas staadiumis rektaalselt või kohe pärast defekatsiooni, soovitatav proovi kogus on ca 30 g.

### **Proovi hoidmine ja pakkimine**

- Proovi võtmine teostatakse võimalikult puhtalt.
- Proov võetakse korralikult suletavasse plastikkonteinerisse või kilekotti.
- Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutada kindlasti mitut kilekotti.
- Proov markeeritakse veekindla markeriga.
- Märgistus proovipakenditel peab olema seostatav kaaskirjal olevaga.

### **Proovi laborisse saatmine**

Laboratoorsed uuringud viiakse läbi Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi Tartu laboris (Kreutzwaldi 30, Tartu).

- Koproproov toimetatakse laborisse võimalikult kiiresti, ideaaljuhul 4-6 tunni jooksul (kuid mitte hiljem kui 24h peale proovi võtmist). Kui kohene transport ei ole võimalik, siis säilitatakse proovi +4...+6 °C juures.  
**PROOVI MITTE KÜLMUTADA!**
- Kui proovi kohene transport ei ole võimalik, siis säilitatakse neid +4...+6 °C juures.

### **Laborisse laekuv info**

- Proovi võtja informeerib laborit proovi(de) saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
- Koos prooviga saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab VTL-i kodulehelt [tellimuste vormid](#) alt.

### **Lisainfo**

Viroloogia-seroloogia osakond, telefon 7 386 111 või 50 66 687

Aprill 2015