

## Proovivõtjuhend Bluetongue`i viiruse uuringuteks PCRga

### Proovi võtmine viiruse tuvastamiseks PCR-ga

- hüübimata täisveri, lilla korgiga (EDTA lisandiga) vaakumkatsutis.
  - Verega täidetakse vähemalt pool katsutist, tagamaks EDTA õige kontsentratsiooni veres.
  - Pärast vereproovi võtmist liigutatakse katsutit 8-10 korda, et antikoagulant verega korralikult seguneks.

### Proovivõtutaara (EDTA lisandiga vaakumkatsutid)

- Vaakumkatsuteid müüvad erinevad ravimifirmad.
- Vaakumkatsuteid võib saada ka Tartust Veterinaar- ja Toidulaboratooriumist (helista viroloogia-seroloogia osakonda, telefon 7 386 111).

### Proovide laborisse saatmine

Proovid tuuakse/saadetakse Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi Tartu laborisse.

- Vereproovid toimetatakse laborisse võimalikult kiiresti, ideaaljuhul 4-6 tunni jooksul (kuid mitte hiljem kui 24h peale proovi võtmist). Kui proovide kohene transport ei ole võimalik, siis säilitatakse proove +4...+6 °C juures. **PROOVE MITTE KÜLMUTADA!**
- Proovid pakitakse lekkekindlalt ja väline pakkematerjal peab olema saastumata ning puhas.

### Laborisse laekuv info proovide saabumisel

- Proovide võtja informeerib laborit proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
- Koos proovidega saadetakse laborisse korrektset täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab VTL-i kodulehelt [tellimuste vormid](#) alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg.

### Lisainfo

Molekulaaranalüüsi osakond, telefon 7 386 121

Viroloogia-seroloogia osakond, telefon 7 386 111 või 50 66687