

Proovivõtjuhend hobuste nakkava metriidi uurimiseks

ANALÜÜSIMEETODID

Analüüs	Meetod	Metoodika	Osakond
Bakterioloogiline uuring	Tekitaja isoleerimine ja identifitseerimine	5DB-TJ-59	Bakterioloogia-patoloogia

ANALÜÜSE TEOSTAV LABORATOORIUM

Tartu laboratoorium- Kreutzwaldi 30, Tartu

PROOVIDE VÕTMINE, SÄILITAMINE JA SAATMINE

Taylorella equigenitalis:

- leitav 3-7 nädalat peale mära haigestumist;
- tundlik hapniku ja kuivamise suhtes.

Täkul tuleb koguda kolm erinevat proovi kolmest erinevast piirkonnast



Proov nr. 1 Sugutiluku juurest


Proov nr. 2 Kusitisuudmelt

https://ahdc.vet.cornell.edu/docs/CEM-Culturing_Contagious_Equine_Metritis.pdf



Proov nr. 3 Kusitisopisest

https://ahdc.vet.cornell.edu/docs/CEM-Culturing_Contagious_Equine_Metritis.pdf

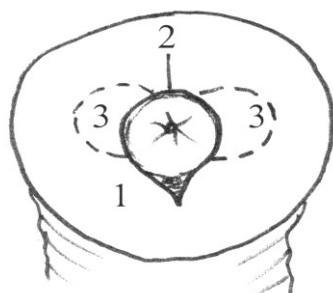

Joonis 1. Skeem


www.evira.fi

1. Sugutilukk (*glans penis*)

2. Kusitisuue (*ostium urethrae*)


3. Kusitisopis (*diverticulum urethrae*)

Märal tuleb koguda kolm erinevat proovi kolmest erinevast piirkonnast

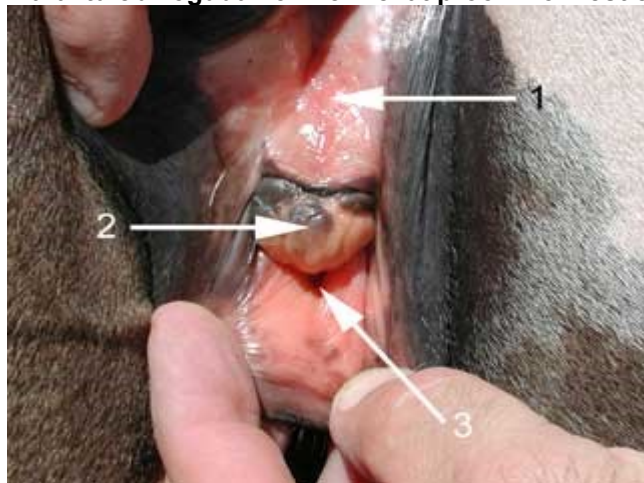

Proovivõtukohtad märal 1-3

<http://www.infovets.com/books/equine/E/E123.htm>

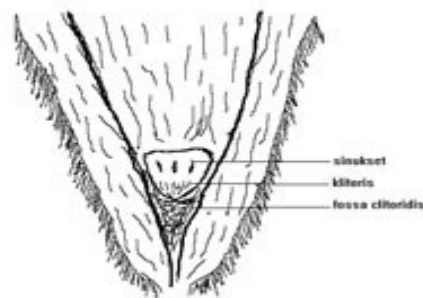

Joonis 2. Skeem

www.evira.fi

1. Häbemepilu (*pudendum femininum*)
2. Kõdistiauk (*fossa clitoridis*)
3. Kõdistiurge (*sinus clitoridis*)

Igalt loomalt kogutakse kolm proovi, kasutades Amies söega transportsõotmeid. Vajaminevad transportsõotmed saab Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi Tartu laborist.



Amies söega transportsõode

Proovivõtutaara

- Proovivõtuks vajaminevaid tampoone väljastavad kõik Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi piirkondlikud laborid.

Proovide pakkimine ja märgistus

- Proov pakitakse lekkekindlalt. Eriti oluline on, et väline pakkematerjal on saastumata ning puhas. Kasutatakse kindlasti mitut kilekotti.
- Iga pakend märgistatakse loetavalt.
- Iga looma proovid pakitakse eraldi kilekottidesse.

Proovide laborisse saatmine ja säilitamine

Proovid peab võtma loomaarst ja paigaldama 10 minuti jooksul transportsõotmesse (Amies söega) ja toimetama laborisse 24 tunni jooksul külmutuskastis. PROOVE MITTE KÜLMUTADA!

Kaaskiri ja laboratooriumi teavitamine

- Proovide võtja informeerib Tartu VTL bakterioloogia-patoloogia osakonda (telefon 7 386 120) proovide saatmisest ja eeldatavast laborisse jõudmise ajast.
- Koos proovidega saadetakse laborisse korrektselt täidetud ja piisavalt infot sisaldav kaaskiri, mille leiab VTL-i kodulehelt [tellimuste vormid](#) alt. Oluline on märkida kaaskirjale proovi võtmise täpne kuupäev ja kellaaeg.

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

ANALÜÜSIDE TEOSTAMISE AEG

Bakterioloogiline uuring: kuni 5 tööpäeva.

ANALÜÜSIMEETODID

Taylorella equigenitalis isoleerimine ja identifitseerimine.

TÄIENDAV INFO JA KONTAKTID

- Bakterioloogia-patoloogia osakond, telefon 738 6120

Koostatud: Triin Tedersoo

Koostanud: 24.07.2019